

ИНСТРУКЦИЯ

Сухожаровой шкаф, стерилизатор NV-210

Технические характеристики:

Терморегулятор: от 0 до 200 °С

Таймер: от 0 до 120 минут

Напряжение: 220 В

Мощность: 300 Вт

Размеры: 31x14x18 см

Объем рабочей камеры 1,8 литров.

Размер внутренней камеры: 25x12x6 см



Применение:

1. Подключите шнур питания к стерилизатору и розетке (розетка евро стандарт).
2. Уложите стерилизуемый инструмент в ванну из нержавеющей стали и закройте крышку стерилизатора.
3. Установите необходимое время (1 час при температуре 180 градусов для режима стерилизации инструмента).
4. Установите необходимую температуру (стерилизатор включился).
5. Красный индикатор показывает, что стерилизатор начал работу.
6. Зеленый индикатор показывает, что начался нагрев стерилизатора (как только он погаснет, значит стерилизатор набрал нужную температуру).
7. Красный индикатор погас - стерилизатор завершил работу.
8. Аккуратно откройте крышку стерилизатора и с помощью двух колец (идут в комплекте) подцепите поддон за специальные ушки и извлеките его на заранее подготовленную поверхность.
9. Дождитесь полного остывания инструмента.

Комплектация:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Стерилизатор - 1 шт | 4. Предохранитель сетевой - 2 шт |
| 2. Шнур сетевой - 1 шт | 5. Поддон из нерж. стали - 1 шт |
| 3. Кольцо металл - 2 шт | 6. Инструкция - 1 шт |